

Documentnummer

Katheterurine afnemen

Doel

Het verkrijgen van katheterurine voor laboratoriumonderzoek.

Reagentia, media en hulpstoffen

- Onsteriele handschoenen
- Kocher
- Optreknaald
- 5cc spuit
- Alcohol 70%
- Urinecontainer



Werkwijze

Vorbereiding

- Pak een urinecontainer en plak hierop de sticker met naam en geboortedatum of patiëntnummer (bij voorkeur de sticker van ordermanagement)
- Vermeld bij de aanvraag of de patiënt antibiotica gebruikt en zo ja, welke antibiotica. Vermeld ook of het een gewassen urine of katheterurine betreft

Werkwijze

- Klem de katheter af m.b.v een kocher op de slang van de katheterzak
- Wacht ca. 15 minuten
- Trek onsteriele handschoenen aan
- Neem de urine af via het afnamepunt aan de katheterzak, neem geen urine uit de katheterzak
- Desinfecteer het afnamepunt met alcohol 70%

- Prik m.b.v. een steriele naald met spuit het afnamepunt aan en zuig de benodigde hoeveelheid urine op
- Breng de urine over in een urinecontainer
- Verwijder de kocher
- Ruim benodigdheden op

Transport

Verstuur de urine z.s.m. naar het LMMI.

Plaats de urine in de koelkast als deze niet meteen naar het LMMI wordt gebracht.