

Acceptatiecriteria - LMMI					
Binnenkomend monster	Type test	Transport medium	Temperatuur (°C)		Max. tijdsduur tot aan onderzoek
			Min.	Max.	
eSwab	Kweek	COPAN eSwab	4	25	≤48 uur
	GO kweek	COPAN eSwab	4	25	≤24 uur
	PCR	COPAN eSwab	4	25	≤5 dagen
Urine	Sneltest	BD Vacutainer Boric Acid Sodium Borate/Formate	4	25	≤48 uur
	Kweek	BD Vacutainer Boric Acid Sodium Borate/Formate	4	25	≤48 uur
	PCR	Steriele container	4	25	≤5 dagen
Specimen Collection Kit	PCR	Abbott Specimen Collection Kit	2	30	≤5 dagen
Feces (ontlasting)	PCR	Steriele feces container	4	25	≤5 dagen
Bloed	Kweek	BD BACTEC flesjes	4	25	≤48 uur
	Immunologie + PCR	Bloedbuis EDTA	4	25	≤5 dagen
	PSIE	Bloedbuis EDTA	4	25	≤24 uur
	Immunologie	Bloedbuis Stol	4	25	≤5 dagen
	Immunologie	Bloedbuis Citraat	4	25	≤5 dagen
	Immunologie	Bloedbuis Heparine	4	25	≤5 dagen
Bloed (uitzonderingen)	CH50 (direct)	Bloedbuis Stol	1	28	≤1 uur
	CH50 (vertraging)	Serum (voorbewerkt)	-20	-20	n.v.t.
	Cryoglobuline	Bloedbuis Stol	35	37	Direct na afname
	Quantiferon (TB) - Immunologie	Bloedbuis Heparine	4	25	≤16 uur
	Quantiferon (TB) - Immunologie	Na voorbereiding	4	25	≤5 dagen
	Malaria - Sneltest	Bloedbuis EDTA	4	25	≤4 uur
	Malaria (dikke druppel)	Bloedbuis EDTA	4	25	≤4 uur
	HIV Viral load	Bloedbuis EDTA	4	25	≤24 uur
Overige materialen	Kweek	Steriele container	4	25	≤48 uur
	PCR	Steriele container	4	25	≤5 dagen