

PAD16VO22 Materiaal voor Chlamydia / GO PCR afnemen (Versie 2)

Doel

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarom materiaal wordt afgenomen m.b.v. de Multi-Collect Specimen Collection Kit (Abbott®). Deze kit wordt gebruikt voor afname en transport van materialen t.b.v. moleculaire diagnostiek (PCR) van *Chlamydia trachomatis* en *Neisseria gonorrhoeae*.

Definitie

LMMI: Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie.

Toepassingsgebied

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Veiligheid


Geen bijzonderheden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De arts / verpleegkundige / doktersassistente is bevoegd om een uitstrijk of urine af te nemen. De urine kan ook afgenomen worden door de patiënt zelf.

Reagentia, media en hulpstoffen

Multi-Collect Specimen Collection Kit (Abbott®).

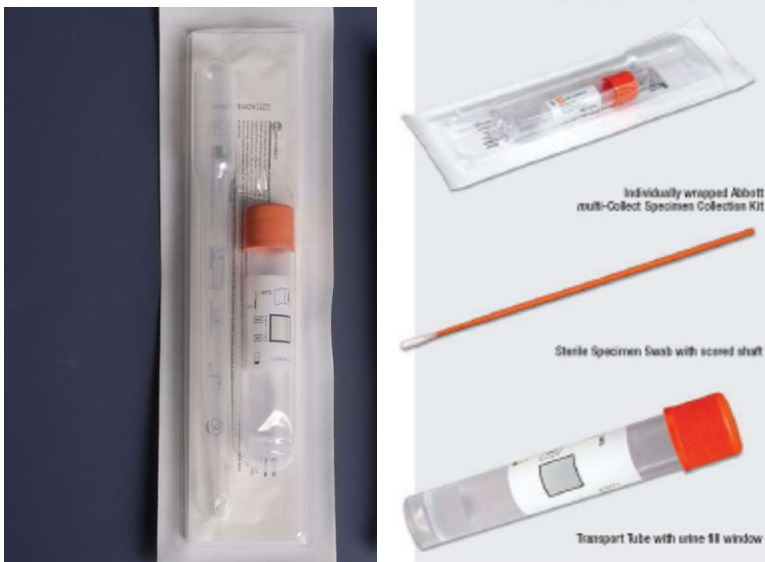

Apparatuur en glaswerk

Niet van toepassing.

Biologisch materiaal

Urine

Uitstrijk anus, vagina, endocervix, urethra, keel of oog

Werkwijze

Vorbereiding

- Informeer de patiënt en vraag toestemming
- Pak een Buisje van de Abbott Multi-Collect Specimen Collection Kit en plak hierop de sticker met naam en geboortedatum of patiëntnummer (bij voorkeur de sticker van ordermanagement)
- In afwachting van gebruik dient de kit in originele verpakking bewaard te worden bij 15-30 °C. Het materiaal is te gebruiken tot de vervaldatum, vermeld op de verpakking.
- Vermeld de afnamelocatie op het aanvraagformulier

Afname

Vagina:

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng vervolgens de steriele swab ca. 5 cm. in de vagina
- Draai 15 tot 30 seconden tegen de wanden van de vagina
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af
-

Endocervicaal:

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng vervolgens de steriele swab in het endocervix kanaal
- Draai 15 tot 30 seconden
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af

Urethra:


- Vermijd urineren minstens 1 uur voor de afname
- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Breng de dunne swab 2 – 4 cm in de urethra
- Draai 2-3 seconden
- Verwijder de swab
- Draai de dop van de transportbuis
- Breek de swab af in de transportbuis en LAAT DE SWAB IN HET TRANSPORTMEDIUM ZITTEN.
- Sluit de transportbuis af

Afname op andere locaties

- Neem de steriele swab uit de verpakking, vermijd aanraken van de wat
- Wrijf met de steriele swab over de te onderzoeken locatie (keel, anus, oog)

Urine:

- Vermijd urineren minstens 1 uur voor de afname
- Vang de eerste 20-30 ml op in een urinecontainer
- Draai de dop van de transportbuis
- Breng met de plastic pipet urine over vanuit de urinecontainer in de transportbuis tot het vloeistofniveau in de buis tussen de lijnen van het venster valt

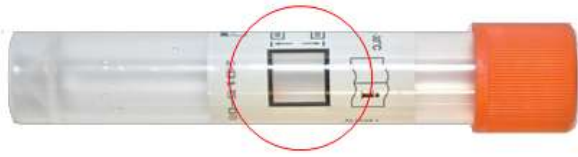

- Sluit de transportbuis af

Bewaren en transport

- Na afname bewaren bij kamertemperatuur
- Breng het materiaal z.s.m. naar het LMMI, maak hiervoor –indien mogelijk- gebruik van de buizenpost

Interpretatie, berekening en uitslag

Niet van toepassing.

Kwaliteitscontrole

Niet van toepassing.

Samenhangende documenten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Niet van toepassing.

Bronnen

Niet van toepassing.

Documentnummer

ETZ – PAD16VO22 Materiaal voor Chlamydia / GO PCR afnemen